

GLOBACID®AF med

ALKOHOLIBAASILINE KIIRDESINFITSEERIMISVAHEND

valmislahus

GLOBACID®AF med on kiirdesinfektsiooniks mõeldud kasutusvalmis desinfektant, mis sobib kasutamiseks kõikidel alkoholi talumatel pindadel (sh meditsiiniseadmetel). Vahend ei jäta pärast kasutamist pindadele jääkaineid, seetõttu sobib ideaalselt ka nende pindade desinfitseerimiseks, mis puutuvad kokku toidu ja toiduainetega.

Vastab tervishoiu, toiduainetööstuses, iluteeninduses jt valdkondades esitatud nõuetele.

TOOTE OMADUSED

- kiire toimeaeg
- põhineb alkoholil
- ei sisalda aldehüüde, kvaternaarseid ammooniumühendeid ega kloori ioone
- ei jäta jääkaineid
- eriti sobiv raskesti ligipääsetavatele kohtadele
- ei vaja maha pesemist
- ei muuda pinna visuaalset väljanägemist

KASUTAMINE

Pihustada või kanda lapiga pindadele, lasta toimida. Pinnad peavad olema täielikult kaetud. Sulgeda kork toote aurustumise vältimiseks. Kui pinna tolerants on teadmata, proovige seda esmalt silmapaistmatul alal. Desinfektsioonivahend GLOBACID®AF med sobib enamiku meditsiiniseadmetega. Orgaanilisest klaasist valmistatud esemeid selle tootega mitte töödelda.

TOIMEAEG

60 sekundit

MIKROBIOLOOGILINE TOIMESPEKTER

MIKROORGANISM	TINGIMUS	KONTSESTRATSIOON	TOIMEAEG
Bakteritsiidne	mustad tingimused	lahjendamata	30 sekundit
Tuberkulotsiidne			
<i>Mycobacterium terrae</i>	mustad tingimused	lahjendamata	30 sekundit
Mükobakteritsiidne toime			
<i>Mycobacterium terrae</i>	puhtad tingimused	lahjendamata	60 sekundit
<i>Mycobacterium avium</i>	puhtad tingimused	lahjendamata	60 sekundit
Fungitsiidne toime			
<i>Candida albicans</i>	mustad tingimused	lahjendamata	60 sekundit
<i>Aspergillus brasiliensis (niger)</i>	mustad tingimused	lahjendamata	60 sekundit
Virutsiidne			
HBV/HCV, HIV	mustad tingimused	lahjendamata	30 sekundit
Herpes simplex	mustad tingimused	lahjendamata	30 sekundit
Influenza viirused	mustad tingimused	lahjendamata	30 sekundit
Vaccinia viirus	mustad tingimused	lahjendamata	30 sekundit
Koroonaviirused	mustad tingimused	lahjendamata	30 sekundit
Adenoviirus	puhtad tingimused	lahjendamata	30 sekundit
Noroviirus	puhtad tingimused	lahjendamata	60 sekundit
Polioviirus	puhtad tingimused	lahjendamata	60 sekundit
Rotaviirus	puhtad tingimused	lahjendamata	30 sekundit

VASTAVUS STANDARDITELE

EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 14562, EN 14563, EN 14476, EN 16777, EN 16615, EN 17387, DVV/RKI

SÄILITAMINE

Vt pakendil olevat kõlblik kuni kuupäeva. Et tagada toote kvaliteeti, säilitada temperatuuril 5-25°C, mitte hoida otsese päikese kiirguse käes.

UTILISEERIMINE

Toode on ökoloogiliselt ohutu, kõik aktiivsed toimeained on äravoolus biolagunevad. Plastpakendi materjalid on taaskasutatavad. Kogumiseks tuleks plastpakend veega loputada ning pudel ja kork eraldada. Sprei oma metallosadega sobib pakendijäätmetega kokku kogumiseks. Toodete transportkast kogutakse vanapaberi konteinerisse. Tagatud on pakendi ja toote kokkusobivus.

OHUTUSALANE TEAVE

Lisateave on leitav toote ohutuskardilt. Kui seoses GLOBACID® AF med kasutamisega on toimunud tõsine tervise halvenemine, tuleb sellest teavitada tootjat ja oma riigi pädevat asutust. Kahtluse korral pidada nõu pädeva asutusega.

KOOSTIS

100g toodet sisaldab aktiivseid toimeaineid: propaan-2-ool 60g, etanool 15g

pH 6-8

Toode omab CE-märgistust vastavalt Meditsiiniseadmete määrusele (EL)2017/745
Biotsiidi reg.nr: 2254/21



PAKENDID: 1L pihusti/klappkorgiga pudel, 5L canister, 6L canister, 10L kanister



Goodpoint Chemicals OÜ
Urda tee 2/1, Jälgimäe 76404,
Saku vald, Harjumaa, Estonia
www.goodpointchemicals.com
info@goodpointchemicals.com

