

GLOBATABS®

KLOORITABLETID

Globatabs® kasutatakse pindade, tööriistade ja seadmete desinfitseerimiseks tervishoiu-, sotsiaalhoolekande-, hooldus- ja haridusasutustes, saunades, basseinides, toiduainetööstuses; vere ja muude kehavedelikega saastunud pindade, ujumisbasseinide vee desinfitseerimiseks.

TOOTE OMADUSED

- eraldavad vees lahustamisel täpse, mõõdetud doosi stabiilset aktiivkloori
- lai toime bakterite, seente, spooride, prioonide, algloomade ja viiruste vastu
- uuringud on näidanud, et naatriumtrokloseeni lahused on aktiivsed ja efektiivsed kuni 10 nädalat, kui hoida lahus suletuna, puhtas pakendis, otsese päikesevalguse eest kaitstuna!
- kordades efektiivsem kui tavalist hüpokloriti sisaldavad tooted!
- väga head puhastusomadused tänu tootes sisalduvale soodale

KASUTAMINE

Pindade desinfektsioon ja ebameeldiva lõhna eemaldamine

Lisada 1 tablett 7L vette (200ppm). Kanda pinnale mopi, käsna või lapiga. Lasta toimida 10 minutit ning loputada pinnad puhta veega.

Määrdunud moppide desinfektsioon

Lisada 1 tablett 7L vette (200ppm). Lasta toimida 10 minutit ning loputada mopid puhta veega.

Munakoorte saneerimine

Lisada 1 tablett 10L vette (150ppm). Kasta munad lahusesse ning koheselt eemaldada vedelikust. Lasta toimida 10 minutit ning loputada puhta veega.

* Järgida kohalikke regulatsioone, et toimeaine doseerimine (ppm) oleks õige

Salati/köögiviljade saneerimine

Lisada 1 tablett 10L vette (150ppm). Jälgida, et tablett oleks täielikult lahustunud enne salati/köögiviljade lahusesse panemist. Lasta toimida 10 minutit ning loputada puhta veega.

* Järgida kohalikke regulatsioone, et toimeaine doseerimine (ppm) oleks õige

Kasutatud süstalde, nõelade jne kahjutustamine

Lisada 5 tabletti 3L vette (2500ppm). Valada lahus nõelade ja süstalde kogumiskonteinerisse.

* Järgida kohalikke regulatsioone, et toimeaine doseerimine (ppm) oleks õige

Bioloogiliste meditsiinijäätmete (veri, kude jne) kahjutustamine

Lisada 20 tabletti 3L vette (10 000ppm).

* Järgida kohalikke regulatsioone, et toimeaine doseerimine (ppm) oleks õige

Vaba kloor töölahuses		Tabletid (mitu tk)	Vesi (L)
ppm	%		
100	0,01	1	15
200	0,02	1	7
300	0,03	1	6
500	0,05	1	3
1000	0,1	2	3
2000	0,2	4	3
3000	0,3	2	1
5000	0,5	10	3
10000	1	20	3

Ujumisbasseini kloreerimine

Vaba kloor on see osa vees olevast kloorist, mida algselt vette lisatakse ja millel on suur desinfitseerimise võime, et hoida vesi puhas ja selge ning mis ei ole veel reageerinud vees leiduvate orgaaniliste ainetega. Vaba kloor ei põhjusta naha ega silmade ärritust, vajadus oleneb temperatuurist, päikesepaistest, suplejate hulgast ja reostusest. Et tagada ujumisbasseini vee-ohutus kasutajatele, on vajalik korrapärane basseini vee desinfitseerimine, arvestades vaba kloori sisalduseks vees 0,5...2 ppm (mg/l). Iga päev tuleb mitu korda kontrollida vaba ja seotud kloori sisaldust basseini vees, samuti vee pH-taset, hädusust ja temperatuuri. Vaata doseerimist tabelist.

Vaba kloor töölahuses		Tabletid (mitu tk)	Vesi (L)
ppm	%		
0,5	0,00005	1	3000
1	0,0001	1	1500
1,5	0,00015	1	1000
2	0,0002	2	1500

TOIMEAEG

Bakteritsiidne, fungitsiidne, virutsiidne toime meditsiiniliselt mustades tingimustes	0,2%	2000ppm	5 min
Mükobakteritsiidne toime, meditsiiniliselt mustades tingimustes	0,2%	2000ppm	15 min
Sporitsiidne (<i>Clostridioides difficile</i>) meditsiiniliselt mustades tingimustes	0,4%	4000ppm	15 min
Sporitsiidne (<i>B. cereus</i> , <i>B. subtilis</i>) meditsiiniliselt mustades tingimustes	0,4%	4000ppm	30 min

SÄILITAMINE

Vt pakendil olevat kõlblik kuni kuupäeva. Säilitada temperatuuril 5-25°C, hästiventileeritud ruumides, eemal soojus- ja süttimisallikatest ning otsestest päikesevalgusest.

UTILISEERIMINE

Töölahus on ökoloogiliselt ohutu, kõik aktiivsed toimeained on äravoolus biolagunevad. Plastpakendi materjalid on taaskasutatavad. Kogumiseks tuleks plastpakend veega loputada ning purk ja kork eraldada. Toode transportkasti kogutakse vanapaberi konteinerisse. Tagatud on pakendi ja toote kokkusobivus.

OHUTUSALANE TEAVE

Täiendava ohutusteabe leiate toote ohutuskaardilt.

KOOSTIS


Kasutage desinfitseerimisvahendeid ohutult. Enne kasutamist lugege kindlasti läbi etikett ja tooteteave.

1 tablett sisaldab: naatriumdikloroisotsüanuraat (CAS:51580-86-0) 2,7g (1,5g aktiivset kloori),
naatriumbikarbonaat, adipiinhape

pH 6

Biotsiidi reg.nr: 1277/14

PAKENDID

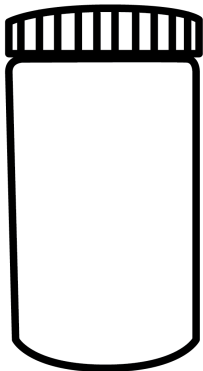

300 tabletti purgis



Goodpoint Chemicals OÜ
Urda tee 2/1, Jälgimäe 76404,
Saku vald, Harjumaa, Estonia
www.goodpointchemicals.com
info@goodpointchemicals.com