

# SUCTION<sup>®</sup> 1

## HAPPELINE IMURSÜSTEEMIDE PUHASTUSVAHEND

### *kontsentraat*

SUCTION<sup>®</sup> 1 on väga hea puhastusvõimega hambaravi imursüsteemide pesemis- ja hooldusvahend. Soovitav on kasutada toodet 1-2 korda nädalas jääkainetest ja mittelahustuvatest sooladest tingitud problemaatiliste ummistusohlike piirkondade hooldamiseks. Regulaarne kasutamine aitab ära hoida ummistuste teket ning lahustab jääkainete kogumikke.

---

#### TOOTE OMADUSED

- hooldab torusüsteeme
- ei vahuta

---

#### KASUTAMINE

Kinniste süsteemide happeline läbipesu teha 1-2 korda nädalas 2% kontsentraadist ja veest valmistatud töölahusega (lisada 980ml veele 20ml Suction<sup>®</sup> 1 kontsentraati), seejärel valada veel 1 liiter töölahust (või osa algsest lahusest) ka süljekaussi. Pärast toimeaja möödumist loputada süsteem jaheda veega (vähemalt joogivee kvaliteediga).

**NB!** Ei ole soovitatav hoida lahust süsteemis üle ettenähtud toimeaja.

Soovitav on kord aastas läbi viia aspiratsioon- ja separatsioonisüsteemide intensiivpesu: Valmistada 2 x 5L töölahus (lisada 4900ml veele 100ml kontsentraati) ja lasta 5L töölahust aspireerida imursüsteemi ning teine 5L valada valamusse, et puhastada separatsioonisüsteem. Enne tööle asumist loputada süsteem jaheda veega (vähemalt joogivee kvaliteediga).

---

#### TOIMEAEG

2%	20ml/l	10min
----	--------	-------

---

#### SÄILITAMINE

Vt pakendil olevat kõlblik kuni kuupäeva. Et tagada toote kvaliteeti, säilitada temperatuuril 5-25°C, mitte hoida otsese päikese kiirguse käes ja vältida külmumist.

---

#### UTILISEERIMINE

Töölahus on ökoloogiliselt ohutu, kõik aktiivsed toimeained on äravoolus biolagunevad. Plastpakendi materjalid on taaskasutatavad. Kogumiseks tuleks plastpakend veega loputada ning pudel ja kork eraldada. Toodete transportkast kogutakse vanapaberi konteinerisse. Tagatud on pakendi ja toote kokkusobivus.

---

#### OHUTUSALANE TEAVE

Täiendava ohutusteabe leiate toote ohutuskaardilt.

---

**KOOSTIS**

sidrunhape, dimetüüldioktüülammooniumkloriid, apelsiniõli (magus)

pH ≤1

Toode omab CE-märgistust vastavalt Meditsiiniseadmete Direktiivile 93/42/EEC



PAKENDID:1L doseerimispuudel



Goodpoint Chemicals OÜ  
Urda tee 2/1, Jälgimäe 76404,  
Saku vald, Harjumaa, Estonia  
[www.goodpointchemicals.com](http://www.goodpointchemicals.com)  
[info@goodpointchemicals.com](mailto:info@goodpointchemicals.com)



*Kasutage desinfitseerimisvahendeid ohutult. Enne kasutamist lugege kindlasti läbi etikett ja tooteteave.*

02/2026