

SUCTION® 12N

ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ АСПИРАЦИОННЫХ СИСТЕМ (концентрат)

Эффективное средство для ежедневного обслуживания, очистки и дезинфекции аспирационных систем, плевательниц и амальгамных сепараторов. Удаляет из системы также наиболее въевшуюся грязь и гели с коррозирующим действием. Ежедневная чистка загрязненных аспирационных систем обеспечивает гигиеничность даже в случае очень масштабного загрязнения, такого как слюна, кровь, дентинная и амальгамная крошка, и держит инфекции под контролем.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- с эффективными чистящими свойствами
- с бактерицидным (в т.ч. туберкулоцидным), вирулицидным и фунгицидным действием
- не пенится
- эффективный по расходам
- быстродействующее

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

В зависимости от рабочих нагрузок аспирационные системы следует чистить и дезинфицировать до 2 раз в день 3%-м рабочим раствором (к 970 мл прохладной воды добавить 30мл SUCTION® 12N, перемешать и пропустить рабочий раствор через аспирационную систему). По истечении времени действия аспирационную систему тщательно промыть водой (по меньшей мере, с качеством питьевой воды).

Внимание! Не рекомендуется держать раствор в системе свыше предусмотренного времени действия.

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА

3%	30 мл/л	10 минут
----	---------	----------

СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ

Продукт обладает бактерицидным, туберкулицидным, фунгицидным (*Candida albicans*, *Aspergillus brasiliensis*), вирулицидным действием - оболочечные вирусы (вкл. гепатит В, гепатит С, ВИЧ, коронавирусы и вирусы гриппа и коревой оспы) и безоболочечные вирусы (вкл. аденовирус).

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, DVV/RKI

ХРАНЕНИЕ

См. срок годности, указанный на упаковке. Чтобы обеспечить качество изделия, хранить при температуре 5-25°C, не хранить на открытом солнце и избегать замерзания.

УТИЛИЗАЦИЯ

Восстановленный раствор экологически безопасен, все активные ингредиенты биоразлагаемы в промывной воде. Пластиковые упаковочные материалы подлежат вторичной переработке. Для сбора

пластиковая упаковка пригодна, если ее промыть, бутыл и крышку разделить. Упаковочная коробка сортируется в контейнер для макулатуры. Совместимость упаковки и продукта гарантируется качеством.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Дополнительные сведения о безопасности см. в паспорте безопасности продукта.

СОСТАВ

100г продукта содержат активные ингредиенты: бифенил-2-ол 7г, метасиликат динатрия 0,8г

pH 11-14

Продукт имеет маркировку CE в соответствии с Директивой 93/42/ЕЕС по медицинским устройствам.



УПАКОВКА : канистра 5 литров



Goodpoint Chemicals OÜ
Urda tee 2/1, Jälgimäe 76404,
Saku vald, Harjumaa, Estonia
www.goodpointchemicals.com
info@goodpointchemicals.com



Используйте дезинфицирующие средства безопасно. Перед использованием внимательно прочитайте информацию о продукте на этикетке.

07/2026