

# GLOBACID®ID valmislahus

## AMIINIBAASILINE INSTRUMENTIDE PUHASTUS- JA DESINFITSEERIMISVAHEND *valmislahus*

GLOBACID®ID on kuluefektiivne, laia toimespektri ja väga heade orgaanilise mustuse eemaldamise omadustega aldehüüdi-, fenooli- ja kloorivaba vahend metallist ja kõigi tehismaterjalidest valmistatud instrumentide ja tarvikute, samuti kõigi endoskoopide eel- ja lõppdesinfektsiooniks.

Lisaks vastab toiduainetööstuses, iluteeninduses jt valdkondades esitatud nõuetele.

### TOOTE OMADUSED

- laia toimespektriga
- sobib kasutamiseks nii instrumentide- ja ultrahelivannides, kui endoskoopide masinpesu seadmetes (soovitav lisada vahublokaatorit)
- kasutuses olev töölahus säilib kuni 7 päeva

### KASUTAMINE

Üksikosadeks lahti võetud instrumendid pihustada üle GLOBACID®ID valmislahusega või asetada kaanega suletavasse töölahusega täidetud leotusvanni. Jälgida, et kogu instrumentaarium oleks lahusega kaetud. Toimeaja möödudes instrumendid loputada jooksva veega (vähemalt joogivee kvaliteediga) või steriilse veega ja kuivatada ebemevaba rätiku või ühekordsete paberrätikutega (ei tohi jätta õhu kätte kuivama). Instrumente/tarvikuid ei ole soovitatav hoida lahuses üle toimeaja.

**NB!** Hambaravis kasutatavaid sirg- ja nurkotsikuid ning turbiine ei tohi asetada vedeliku sisse. Neil töödeldakse välispinnad kiirdesinfektsioonivahendiga (nt VITASEPT®WIPES med) ülepühkimise teel.

**NB! Vältida kokkupuudet aldehüüdi baasiliste toodetega!** Sellest tulenevalt tuleb eelnevalt pinnad ja instrumendid aldehüüdi jääkidest puhastada.

### TOIMEAEG

5 minutit

### MIKROBIOLOOGILINE TOIMESPEKTER

| MIKROORGANISM                  | TINGIMUS          | KONTSENTRATSIOON | TOIMEAEG  |
|--------------------------------|-------------------|------------------|-----------|
| <b>Bakteritsiidne</b>          | mustad tingimused | lahjendamata     | 5 minutit |
| <b>Tuberkulotsiidne</b>        |                   |                  |           |
| <i>Mycobacterium terrae</i>    | mustad tingimused | lahjendamata     | 5 minutit |
| <b>Pärmseentevastane toime</b> |                   |                  |           |
| <i>Candida albicans</i>        | mustad tingimused | lahjendamata     | 5 minutit |
| <b>Virutsiidne</b>             |                   |                  |           |
| HBV/HCV, HIV                   | mustad tingimused | lahjendamata     | 5 minutit |
| Herpes simplex                 | mustad tingimused | lahjendamata     | 5 minutit |
| Influenza viirused             | mustad tingimused | lahjendamata     | 5 minutit |
| Vaccinia viirus                | mustad tingimused | lahjendamata     | 5 minutit |
| Koroonaviirused                | mustad tingimused | lahjendamata     | 5 minutit |
| Adeno virus                    | mustad tingimused | lahjendamata     | 5 minutit |
| Polio-virus                    | mustad tingimused | lahjendamata     | 5 minutit |

---

## VASTAVUS STANDARDITELE

EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 17111, EN 17126, DVG, DVV/RKI, DGHM/ÖGHMP, Karl Storz endoscope

---

## SÄILITAMINE

Vt pakendil olevat kõlblik kuni kuupäeva. Et tagada toote kvaliteeti, säilitada temperatuuril 5-25°C, mitte hoida otsese päikese kiirguse käes ja vältida külmumist.

---

## UTILISEERIMINE

Toode on ökoloogiliselt ohutu, kõik aktiivsed toimeained on äravoolus biolagunevad. Plastpakendi materjalid on taaskasutatavad. Kogumiseks tuleks plastpakend veega loputada ning pudel ja kork eraldada. Spray oma metallosadega sobib pakendijäätmetega kokku kogumiseks. Toodete transportkast kogutakse vanapaberi konteinerisse. Tagatud on pakendi ja toote kokkusobivus.

---

## OHUTUSALANE TEAVE

Täiendava ohutusteabe leiate toote ohutuskaardilt.

---

## KOOSTIS

100g toodet sisaldab aktiivseid toimeaineid: N-(3-aminopropüül)-N-dodetsüülpropan-1,3-diamiin 0,56g, didetsüüldimetüülammooniumkloriid 0,36g

**pH 11-12**

Toode omab CE-märgistust vastavalt Meditsiiniseadmete määrusele (EL)2017/745



**PAKENDID:** 1L doseerimispuudel, 5L kanister, 6L kanister, 10L kanister



Goodpoint Chemicals OÜ  
Urda tee 2/1, Jälgimäe 76404,  
Saku vald, Harjumaa, Estonia  
[www.goodpointchemicals.com](http://www.goodpointchemicals.com)  
[info@goodpointchemicals.com](mailto:info@goodpointchemicals.com)

