

CYCLONE[®]RTU med

PUHASTUSOMADUSTEGA DESINFITSEERIMISVAHEND

valmislahus

CYCLONE[®]RTU med on efektiivne vahend meditsiiniseadmete (siibrid, pott-toolid jne) puhastamiseks, desinfitseerimiseks ja ebameeldiva lõhna eemaldamiseks. Toode sobib veepesu taluvate pindade puhastamiseks.

Vastab tervishoius, toiduainetööstuses, iluteeninduses jt valdkondades esitatud nõuetele.

TOOTE OMADUSED

- heade puhastusomadustega
- eemaldab uriinist tuleneva ebameeldiva lõhna
- kiire toimeaeg (1 minut)

KASUTAMINE

Kanda pinnale pihustades või lapiga, lasta toimida 1 minut ning loputada puhta veega.

TOIMEAEG

60 sekundit

MIKROBIOLOOGILINE TOIMESPEKTER

MIKROORGANISM	TINGIMUS	KONTSENTRATSIOON	TOIMEAEG
Bakteritsiidne	mustad tingimused	lahjendamata	60 sekundit
Pärmseentevastane toime			
<i>Candida albicans</i>	mustad tingimused	lahjendamata	60 sekundit

VASTAVUS STANDARDITELE

EN 13727, EN 1275, EN 13624

SÄILITAMINE

Vt pakendil olevat kõlblik kuni kuupäeva. Et tagada toote kvaliteeti, säilitada toatemperatuuril, mitte hoida otsese päikese kiirguse käes ja vältida külmumist.

UTILISEERIMINE

Toode on ökoloogiliselt ohutu, kõik aktiivsed toimeained on äravoolus biolagunevad. Plastpakendi materjalid on taaskasutatavad. Kogumiseks tuleks plastpakend veega loputada ning pudel ja kork eraldada. Spray oma metallosadega sobib pakendijäätmetega kokku kogumiseks. Toodete transportkast kogutakse vanapaberi konteinerisse. Tagatud on pakendi ja toote kokkusobivus.

OHUTUSALANE TEAVE

Täiendava ohutusteabe leiate toote ohutuskaardilt.

KOOSTIS

100g toodet sisaldab aktiivseid toimeaineid: C12–18-alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid 0,12g, (C12-14)-alküüldimetüül(etüülbensüül)ammooniumkloriid 0,12g.

pH 3

Toode omab CE-märgistust vastavalt Meditsiiniseadmete Direktiivile 93/42/EEC



PAKENDID:500 ml pudel, 1L spreid pudel,5L canister



Goodpoint Chemicals OÜ
Urda tee 2/1, Jälgimäe 76404,
Saku vald, Harjumaa, Estonia
www.goodpointchemicals.com
info@goodpointchemicals.com



Kasutage desinfitseerimisvahendeid ohutult. Enne kasutamist lugege kindlasti läbi etikett ja tooteteave.

02/2026