

CYCLONE RTU med

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО С ЧИСТЯЩИМИ СВОЙСТВАМИ *готовый раствор*

Cyclone RTU med это эффективное средство для чистки медицинского оборудования (больничные утки, стульчаки и т.д.), их дезинфекции и устранения неприятного запаха. Продукт подходит для очистки водостойких поверхностей.

Соответствует требованиям, предъявляемым в здравоохранении, пищевой промышленности, сфере косметических услуг и других сферах.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- хорошие моющие свойства
- устраняет неприятный запах даже от мочи
- быстродействующее (1 минута)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Распылите раствор или нанесите тканью на поверхности, дайте подействовать в течение 1 минуты и смойте чистой водой.

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ

60 секунд

СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ

| МИКРООРГАНИЗМ | УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ | КОНЦЕНТРАЦИЯ | КОНТАКТНОЕ ВРЕМЯ |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Бактерицидная эффективность | грязные условия | неразбавленный | 60 секунд |
| Противогрибковая эффективность | | | |
| <i>Candida albicans</i> | грязные условия | неразбавленный | 60 секунд |

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

EN 13727, EN 1275, EN 13624

ХРАНЕНИЕ

См. срок годности, указанный на упаковке. Чтобы обеспечить качество изделия, не храните его на открытом солнце и избегайте его замерзания.

УТИЛИЗАЦИЯ

Продукт экологически безопасен, все активные ингредиенты биоразлагаемы в канализации. Пластиковые упаковочные материалы подлежат вторичной переработке. Для сбора пластиковый контейнер необходимо промыть водой, а бутылку и крышку разделить. Спрей с металлическими частями подходит для сбора отходов упаковки. Коробка для транспортировки продукта собирается в контейнер для макулатуры. Совместимость упаковки и продукта гарантируется.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Дополнительные сведения о безопасности см. в паспорте безопасности продукта.

СОСТАВ

100г продукта содержат активные ингредиенты: бензил-С12-18-алкилдиметилхлорид 0,12г, С12-14-алкил[(этил фенил)метил]диметилхлорид 0,12г

рН 3



Продукт имеет маркировку CE в соответствии с Директивой 93/42/ЕЕС по медицинским устройствам.


УПАКОВКА



1л бутылка
с распылителем



1л бутылка
с откидной крышкой

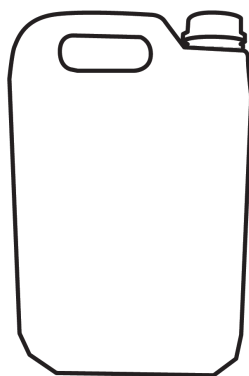

5л канистра



Goodpoint Chemicals OÜ
Urda tee 2/1, Jälgimäe 76404,
Saku vald, Harjumaa, Estonia
www.goodpointchemicals.com
info@goodpointchemicals.com



Используйте дезинфицирующие средства безопасно. Перед использованием внимательно прочитайте информацию о продукте на этикетке.

06/2022