

GLOBACID®STERIL

ХИМИЧЕСКИЙ СТЕРИЛЯНТ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ *готовый раствор*

Globacid®Steril — это средство на основе альдегидов, без фенола и хлора, для дезинфекции высокого уровня и химической стерилизации инструментов и принадлежностей из металла и любых синтетических материалов. Подходит для стерилизации инструментов и аксессуаров, используемых в салонах красоты.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- широкий спектр действия
- удобный
- в зависимости от нагрузки рабочий раствор можно использовать в течение 30 дней

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Предварительно вымытые, продезинфицированные (например, Globaclean®) и разобранные инструменты поместить в закрываемую крышкой ванну для замачивания, наполненную рабочим раствором. Следить, чтобы все инструменты были покрыты раствором. По истечении времени действия промыть инструменты проточной водой (по меньшей мере, с качеством питьевой воды) или стерильной водой и высушить полотенцем, не содержащем пуха, или одноразовой бумажной салфеткой (нельзя оставлять сушиться на воздухе). Инструменты/ принадлежности не рекомендуется держать в растворе дольше времени действия.

Внимание! Избегать контакта с продуктами на основе амина! Инструменты не следует дезинфицировать Globacid®ID перед тем, как поместить их в раствор Globacid®Steril.

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ

Химическая стерилизация - 30 минут

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ СПЕКТР

Средство обладает полным спороцидным действием (*C.difficile*, *B.subtilis*, *B.cereus*), что означает уничтожение всех микроорганизмов (в т.ч. грибов, бактерий, вирусов).

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

EN 17126

ХРАНЕНИЕ

См. срок годности, указанный на упаковке. Чтобы обеспечить качество изделия, хранить при температуре 5-25°C, не хранить на открытом солнце и избегать заморзания.

УТИЛИЗАЦИЯ

Продукт экологически безопасен, все активные ингредиенты биоразлагаемы в канализации. Пластиковые упаковочные материалы подлежат вторичной переработке. Для сбора пластиковый контейнер необходимо промыть водой, а бутылку и крышку разделить. Коробка для транспортировки продукта собирается в контейнер для макулатуры. Совместимость упаковки и продукта гарантируется.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


Дополнительные сведения о безопасности см. в паспорте безопасности продукта.

СОСТАВ


100г продукта содержат активные ингредиенты: глутаральдегид 2,6г, хлорид дидецилдиметиламмония 0,85г

pH 5-7

УПАКОВКА

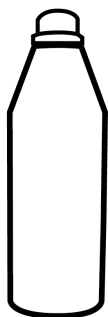

1л бутылка

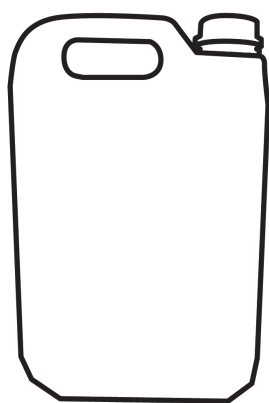

5л канистра



Goodpoint Chemicals OÜ
Urda tee 2/1, Jälgimäe 76404,
Saku vald, Harjumaa, Estonia
www.goodpointchemicals.com
info@goodpointchemicals.com

