

VITASEPT®P WIPES

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ САЛФЕТКИ НА БАЗЕ АЛКОГОЛЯ

Салфетки Vitasept®P Wipes - чистящее средство для медицинских изделий. Также подходит для быстрой дезинфекции спиртоустойчивых поверхностей. После использования средство не оставляет осадка на поверхности, и поэтому идеально подходит для обработки поверхностей, соприкасающихся с пищей и продуктами питания.

Соответствует требованиям, предъявляемым в здравоохранении, пищевой промышленности, сфере косметических услуг и других сферах.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- быстродействующее
- на базе этанола
- не содержит альдегидов, четвертичных аммониевых соединений и ионов хлора
- не оставляет осадка
- особенно подходит для труднодоступных мест
- мягкий материал наподобие ткани, не содержит целлюлозы и не оставляет на поверхностях частиц пыли
- не требует смывания
- не меняет внешний вид поверхности

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Вытаскивать салфетки до перфорированного участка в необходимом количестве, при отрывании придерживая при необходимости другой рукой. Все поверхности тщательно протереть салфеткой Vitasept®P Wipes и убедиться, что очищаемый участок полностью покрыт дезинфицирующим веществом. Во избежание перекрестного загрязнения салфетки предназначены для одноразового использования. После использования салфетку следует выбросить. Чтобы салфетки не высыхали, следует всегда плотно закрывать крышку. Дезинфицирующее средство Vitasept®P Wipes подходит для большинства медицинских устройств. Не обрабатывайте этим продуктом изделия из органического стекла.

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ

30 секунд

60 секунд (EN 16615)

3 минуты (споры *Aspergillus niger*)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ СПЕКТР

Бактерицидная эффективность EN 13727	30 секунд
Бактерицидная и фунгицидная эффективность EN 13697	3 минуты
Бактерицидная и фунгицидная эффективность (метод протирания) EN 16615	60 секунд
Анти-дрожжевая эффективность EN 13624	30 секунд
Фунгицидная эффективность EN 13624	3 минуты
Туберкулоцидная эффективность EN 14348	30 секунд
Вирулицидная эффективность EN 14476	30 секунд

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 16615

ХРАНЕНИЕ

См. срок годности, указанный на упаковке. Чтобы обеспечить качество изделия хранить при температуре 5-25°C, не хранить на открытом солнце.

УТИЛИЗАЦИЯ

Пластиковые упаковочные материалы подлежат вторичной переработке. Для утилизации упаковки промыть ее содержимое водой. Коробка для транспортировки продукта собирается в контейнер для макулатуры. Совместимость упаковки и продукта гарантируется.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Дополнительные сведения о безопасности см. в паспорте безопасности продукта. Если в связи с применением Vitasept®P Wipes произошло серьезное ухудшение здоровья, необходимо сообщить об этом производителю и компетентному органу вашей страны. В случае сомнений проконсультируйтесь с компетентным органом.

ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИИ

Внимательно прочитайте руководство пользователя и паспорт безопасности перед использованием продукта. Подробную информацию см. в техническом паспорте.


СОСТАВ

100г продукта содержат активные ингредиенты: этанол 80г

pH ~7

Продукт имеет маркировку CE в соответствии с Регламентом о медицинских устройствах (ЕС) 2017/745.

УПАКОВКА

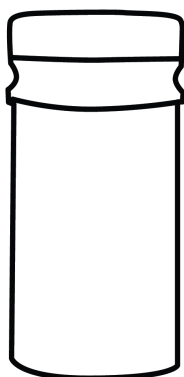

150шт в банке (20x20см)



600шт в ведре (18x20см)



Goodpoint Chemicals OÜ
Urda tee 2/1, Jälgimäe 76404,
Saku vald, Harjumaa, Estonia
www.goodpointchemicals.com
info@goodpointchemicals.com



Используйте дезинфицирующие средства безопасно. Перед использованием внимательно прочитайте информацию о продукте на этикетке.