

GLOBACID[®]AF med

ALKOHOLIBAASILINE KIIRDESINFITSEERIMISVAHEND *valmislahus*

Globacid[®]AF med on kiirdesinfektsiooniks mõeldud kasutusvalmis desinfektant, mis sobib kasutamiseks kõikidel alkoholi taluvatel pindadel (sh meditsiiniseadmetel). Vahend ei jäta pärast kasutamist pindadele jääkaineid, seetõttu sobib ideaalselt ka nende pindade desinfektsiooniks, mis puutuvad kokku toidu ja toiduainetega.

Vastab tervishoius, toiduainetööstuses, iluteeninduses jt valdkondades esitatud nõuetele.

TOOTE OMADUSED

- kiire toimeaeg (30-60 sek)
- põhineb alkoholil
- ei sisalda aldehüüde, kvaternaarseid ammooniumühendeid ega kloori ioone
- ei jäta jääkaineid
- eriti sobiv raskesti ligipääsetavatele kohtadele
- ei vaja maha pesemist
- ei muuda pinna visuaalset väljanägemist

KASUTAMINE

Pihustada või kanda lapiga pindadele, lasta toimida. Pinnad peavad olema täielikult kaetud. Sulgeda kork toote aurustumise vältimiseks. Kui pinna tolerants on teadmata, proovige seda esmalt silmapaistmatul alal. Desinfektsioonivahend Globacid[®]AF med sobib enamiku meditsiiniseadmetega. Orgaanilisest klaasist valmistatud esemeid selle tootega mitte töödelda.

TOIMEAEG

30 sekundit (noro- ja polioviiirus 60 sekundit)

MIKROBIOLOOGILINE TOIMESPEKTER

Bakteritsiidne EN 13727	60 sekundit
Bakteritsiidne ja fungitsiidne EN 13697	60 sekundit
Bakteritsiidne ja fungitsiidne (pühkides) EN 16615	60 sekundit
Bakteritsiidne ja fungitsiidne EN 17387	3 minutit
Pärmseentevastane toime EN 17387	60 sekundit
Fungitsiidne EN 13624	60 sekundit
Fungitsiidne EN 14562	3 minutit
Tuberkulotsiidne EN 14348	30 sekundit
Mükobakteritsiidne EN 14348, EN 14563	60 sekundit
Virutsiidne EN 14476	30 – 60 sekundit

VASTAVUS STANDARDITELE

EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 14562, EN 14563, EN 14476, EN 16777, EN 16615, EN 17387, DVV/RKI

SÄILITAMINE

Vt pakendil olevat kõlblik kuni kuupäeva. Et tagada toote kvaliteeti, säilitada temperatuuril 5-25°C, mitte hoida otsese päikese kiirguse käes.

UTILISEERIMINE

Toode on ökoloogiliselt ohutu, kõik aktiivsed toimeained on äravoolus biolagunevad. Plastpakendi materjalid on taaskasutatavad. Kogumiseks tuleks plastpakend veega loputada ning pudel ja kork eraldada. Sprei oma metallosadega sobib pakendijätmetega kokku kogumiseks. Toodete transportkast kogutakse vanapaberi konteinerisse. Tagatud on pakendi ja toote kokkusobivus.

OHUTUSALANE TEAVE

Lisateave on leitav toote ohutuskaardilt. Kui seoses Globacid®AF med kasutamisega on toimunud tõsine tervise halvenemine, tuleb sellest teavitada tootjat ja oma riigi pädevat asutust. Kahtluse korral pidada nõu pädeva asutusega.

KOOLITUS JA NÕUANDED

Lugeda hoolikalt läbi kasutusjuhend ja ohutuskaart enne toote kasutamist. Üksikasjaliku teabe saamiseks vaadata tehniliste andmete lehte.

KOOSTIS

100g toodet sisaldab aktiivseid toimeaineid: propaan-2-ool 60g, etanool 15g

Toode omab CE-märgistust vastavalt Meditsiiniseadmete Direktiivile 93/42/EEC
Biotsiidi reg.nr: 2254/21




PAKENDID



1L spray pudel



1L klappkorgiga pudel

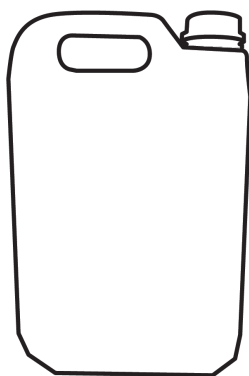

5L kanister



Goodpoint Chemicals OÜ
Urda tee 2/1, Jälgimäe 76404,
Saku vald, Harjumaa, Estonia
www.goodpointchemicals.com
info@goodpointchemicals.com



Kasutage desinfitseerimisvahendeid ohutult. Enne kasutamist lugege kindlasti läbi etikett ja tooteteave.