

GLOBACID[®]AF med

СРЕДСТВО ДЛЯ БЫСТРОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ НА БАЗЕ АЛКОГОЛЯ *готовый раствор*

Globacid[®]AF med готовое к применению дезинфицирующее средство, предназначенное для быстрой дезинфекции, подходит для использования на любых поверхностях, выдерживающих воздействие спирта (в т. ч. на медицинских приборах). После использования средство не оставляет осадка на поверхности, и поэтому идеально подходит для обработки поверхностей, соприкасающихся с пищей и продуктами питания.

Соответствует требованиям, предъявляемым в здравоохранении, пищевой промышленности, сфере косметических услуг и других сферах.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- быстродействующее (30-60 сек.)
- на базе алкоголя
- не содержит альдегидов, четвертичных аммониевых соединений и ионов хлора
- не оставляет осадка
- особенно подходит для труднодоступных мест
- не требует смывания
- не меняет внешний вид поверхности

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Распылить или нанести тряпкой на поверхность и оставить для воздействия. Поверхность должна быть покрыта полностью. Закройте крышку, чтобы предотвратить испарение продукта. Если допуск на поверхность неизвестен, сначала попробуйте его на незаметном участке. Дезинфицирующее средство Globacid[®]AF med подходит для большинства медицинских устройств. Не обрабатывайте этим продуктом изделия из органического стекла.

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ

30 секунд (норо- и полиовирус 60 секунд)

СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ

Бактерицидная эффективность EN 13727	60 секунд
Бактерицидная и фунгицидная эффективность EN 13697	60 секунд
Бактерицидная и фунгицидная эффективность (метод протирания) EN 16615	60 секунд
Бактерицидная и фунгицидная эффективность EN 17387	3 минуты
Анти-дрожжевая эффективность EN 17387	60 секунд
Фунгицидная эффективность EN 13624	60 секунд
Фунгицидная эффективность EN 14562	3 минуты
Туберкулоцидная эффективность EN 14348	30 секунд
Микобактерицидная эффективность EN 14348, EN 14563	60 секунд
Вирулицидная эффективность EN 14476	30 – 60 секунд

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 14562, EN 14563, EN 14476, EN 16615, EN 17387, DVV/RKI

ХРАНЕНИЕ

См. срок годности, указанный на упаковке. Чтобы обеспечить качество изделия хранить при температуре 5-25°C, не хранить на открытом солнце.

УТИЛИЗАЦИЯ

Продукт экологически безопасен, все активные ингредиенты биоразлагаемы в канализации. Пластиковые упаковочные материалы подлежат вторичной переработке. Для сбора пластиковый контейнер необходимо промыть водой, а бутылку и крышку разделить. Спрей с металлическими частями подходит для сбора отходов упаковки. Коробка для транспортировки продукта собирается в контейнер для макулатуры. Совместимость упаковки и продукта гарантируется.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Дополнительную информацию можно найти в паспорте безопасности продукта. Если в связи с применением Globacid®AF med произошло серьезное ухудшение здоровья, необходимо сообщить об этом производителю и компетентному органу вашей страны. В случае сомнений проконсультируйтесь с компетентным органом.

ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИИ

Внимательно прочитайте руководство пользователя и паспорт безопасности перед использованием продукта. Подробную информацию см. в техническом паспорте.

СОСТАВ

100г продукта содержат активные ингредиенты: пропан-2-ол 60г, этанол 15г

 0537 Продукт имеет маркировку CE в соответствии с Директивой 93/42/ЕЕС по медицинским устройствам.


УПАКОВКА



1л бутылка
с распылителем



1л бутылка
с откидной крышкой

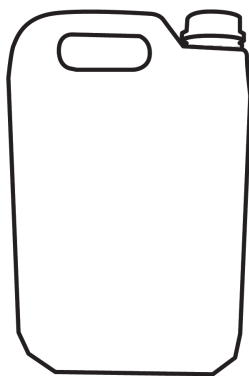

5л канистра



Goodpoint Chemicals OÜ
Urda tee 2/1, Jälgimäe 76404,
Saku vald, Harjumaa, Estonia
www.goodpointchemicals.com
info@goodpointchemicals.com



Используйте дезинфицирующие средства безопасно. Перед использованием внимательно прочитайте информацию о продукте на этикетке.