

GLOBACID[®]STERIL

INSTRUMENTIDE KEEMILISE STERILISATSIOONI VAHEND

valmislahus

Globacid[®]Steril on aldehüdibaasiline fenooli- ja kloorivaba vahend metallist ja kõigi tehismaterjalidest valmistatud instrumentide ja tarvikute kõrgastme desinfitseerimiseks ja keemiliseks sterilisatsiooniks. Sobilik vahend iluteeninduses kasutatavate instrumentide ja tarvikute steriliseerimiseks.

TOOTE OMADUSED

- laia toimespektriga
- kasutajasõbralik
- olenevalt töökoormusest säilib kasutuses olev töölahus kuni 30 päeva

KASUTAMINE

Eelnevalt pestud, desinfitseeritud (nt Globaclean[®]-ga) ja üksikosadeks lahti võetud instrumendid asetada kaanega suletavasse töölahusega täidetud leotusvanni. Jälgida, et kogu instrumentarium oleks lahusega kaetud. Toimeaja möödudes instrumendid loputada jooksva veega (vähemalt joogivee kvaliteediga) või steriilse veega ja kuivatada ebemevaba rätiku või ühekordsete paberrätikutega (ei tohi jätta õhu kätte kuivama). Instrumente/tarvikuid ei ole soovitatav hoida lahuses üle toimeaja.

NB! Vältida kokkupuudet amiinibaasiliste toodetega! Instrumente ei tohiks enne Globacid[®]Steril lahusesse panemist desinfitseerida Globacid[®]ID lahusega.

TOIMEAEG

Keemiline sterilisatsioon - 30 minutit

MIKROBIOLOOGILINE TOIMESPEKTER

Tootel on täissporitsiidne toime (*C.difficile*, *B.subtilis*, *B.cereus*), mis tähendab, et hävinevad kõik mikroorganismid (sh seened, bakterid, viirused).

VASTAVUS STANDARDITELE

EN 17126

SÄILITAMINE

Vt pakendil olevat kõlblik kuni kuupäeva. Et tagada toote kvaliteeti, säilitada temperatuuril 5-25°C, mitte hoida otsese päikesekiirguse käes ja vältida külmumist.

UTILISEERIMINE

Toode on ökoloogiliselt ohutu, kõik aktiivsed toimeained on äravoolus biolagunevad. Plastpakendi materjalid on taaskasutatavad. Kogumiseks tuleks plastpakend veega loputada ning pudel ja kork eraldada. Toodete transportkast kogutakse vanapaberi konteinerisse. Tagatud on pakendi ja toote kokkusobivus.

OHUTUSALANE TEAVE

Täiendava ohutusteabe leiate toote ohutuskaardilt.


KOOSTIS

100g toodet sisaldab aktiivseid toimeaineid: glutaraal 2,6g, didetsüüldimetüülammooniumkloriid 0,85g


pH 5-7

Biotsiidi reg.nr: 2345/22

PAKENDID

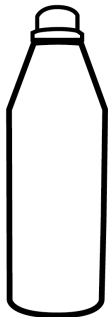

1L pudel

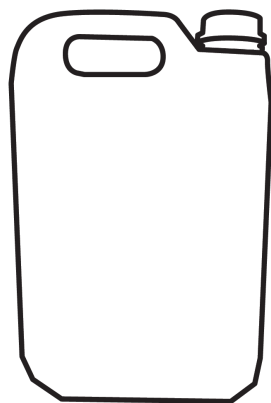

5L kanister



Goodpoint Chemicals OÜ
Urda tee 2/1, Jälgimäe 76404,
Saku vald, Harjumaa, Estonia
www.goodpointchemicals.com
info@goodpointchemicals.com

