

Kasutusjuhend

(DFU BDTP 06-2015 versioon A)

See kasutusjuhend kehtib järgmise Sterintech™ toote kohta:

102.002.0020 Bowie Dick Test pakk, 20 tk pakis

Bowie Dick Test Pakk (BDTP)

Tähelepanu! Kaupa vastu võttes, kontrolli, et pakid on terved ning keemiliste indikaatorite säilivusaeg piisav.

Sissejuhatus:

Bowie Dick Test pakki kasutatakse rutiinseks igapäevaseks vaakumiga aurusterilisaatorite monitoorimiseks. Bowie Dick Test pakk on koostatud tuginedes originaal Bowie Dick Test pakile ning seda võib kasutada vaakumiga aurusterilisaatoris Bowie Dick Testi tsükliks.

Iga sterilisatsiooni tsükliga kaasneb oht, et sterilisatsioon ei toimu erinevatel põhjustel. Nendeks võivad olla näiteks õhu olemasolu auru sissetõmbes, mittekondenseerunud gaaside olemasolu aurugeneraatoris või leke uste tihendite vahelt, kuid ka madal temperatuur või lühike temperatuuri hoidmise aeg.

Sterilisaatori välja printitud leht või tabel sterilisatsiooni parameetrite kohta ei ole piisav, et olla kindel sterilisatsiooni tingimuste täitmisel kogu kambri ulatuses. Mõndasid eelpool mainitud häireid ei suuda rõhu ja temperatuuri andurid välja selgitada.

Selletõttu on Bowie Dick Testi tegemine nüüdseks aastaid kohustuslik, et kindlaks teha igasugused aurusterilisaatori rikked enne, kui sterilisaator antakse päevaks kasutusse.

Indikaator indikaatori lehel on kaetud laki kihiga, tänu millele ei saa ei tint ega mingi muu aine tindist kaduda. Indikaatori tint ei sisalda ohtlikke ega toksilisi komponente ning selle võib visata tavaprügisse.

Test annab tulemuse auru autoklaavis 134°C – 3,5 min / 121°C – 15min.

Kuidas kasutada BDTP?

- I. Võta üks Bowie Dick Test Pakk
- II. Pane BDTP kõige madalamale laadimisriiulile ning sisesta laadimisriiul nii, et BDTP jääks äravoolu kohale. See on üks jahedamaid kohti sterilisaatoris. Bowie Dick Test Pakki kasutatakse tühjas sterilisaatori kambris.
- III. Pane sterilisaatori uks kinni ning pane Bowie Dick Testi programm tööle.
- IV. Pärast sterilisatsiooni tsükli lõppemist ja paari minutit jahtumist, võta BDTP sterilisaatorist välja.
- V. Ava pakend, võta indikaatori leht pakist välja ning kontrolli lehe ühtlast värvumist. Kui kõik alad on täielikult roosad, siis on test läbitud.
- VI. Värvimuutusest sõltuvalt otsustab personal, kas sterilisaatorit võib sel päeval kasutada.
- VII. Pärast indikaatorilehe täitmist (kuupäev, nimi, sterilisaator, tulemus jne) saab selle säilitada dokumentide hulgas. Ülejäänud paki võib ära visata.
- VIII. Kui test ei läbinud, peaks tegema uue Bowie Dick Testi samalt tootjalt ning samast brändist. Kui ka see test ei lähe läbi, peaks paluma abi sterilisaatori tehnikult, masina ja/või BDTP edasimüüjalt.

Klassifikatsioon

BDTP on disainitud vastavuses standardiga ISO 11140-4 Type 2.


Säilitamise tingimused

Oluline on BDTP säilitamine ja hoidmine vastavalt toodete kastil välja toodud nõuetele.

Hoiatus!

See kasutusjuhend võib tulevikus muutuda. Kontrolli regulaarselt meie koduleheküljel uuendatud kasutusjuhendite osas.

Bowie Dick Test Paki värvimuutused

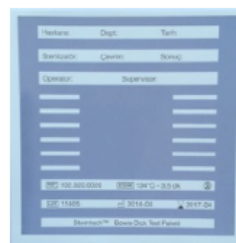


1) Steriliseerimata



2) Pole vaakumit / pole auru



3) Liiga vähe vaakumi

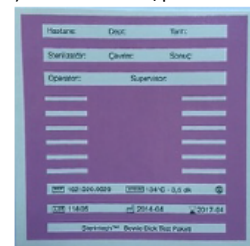

4) Täielikult steriliseeritud (test on läbitud)

Värvimuutuste selgitus:

Pilt 1: Töötlemata BDT leht (keemilise indikaatori originaalvärv)

Pilt 2: Tüüpiline vähestele vaakumi pulsatsioonidele / auru penetratsioonile

Pilt 3: Tüüpiline liiga vähesele vaakumile.

Pilt 4: Täielikult õnnestunud värvimuutus.