

## Kasutusjuhend

### (DFU Sterilization rolls 06.2013 versioon C)

See kasutusjuhend kehtib järgmise Sterintech™ toote kohta:

#### Sterilisatsioonirull, lame:

301.xxx.0001 xxx mm x 200m

#### Sterilisatsioonirull, lõõtsaga:

302.xxx.0001 xxx mm x 200m

#### Sterilisatsioonirull, Tyvek:

303.xxx.0001 xxx mm x 70m



#### Steriliseerimise kilerullid

Tähelepanu! Kaupa vastu võttes, kontrolli, et pakid on terved ning materjalide säilivusaeg piisav.

#### Sissejuhatus:

Steriliseerimise kilerullid on mõeldud meditsiiniseadmete pakendamiseks (kirurgilised instrumendid jne) enne sterilisatsioonini, et kaitsta neid vahendeid ning tagada steriilne barjäär.

Sterilisatsioonirullidel on 3 keemilist indikaatorit (STEAM – aur, FORM – formaldehüüd, EO – etüleenoksiid). Värvimuutus on kirjeldatud iga indikaatori juures. Sterilisatsioonirullid on vastavuses järgmiste standarditega: EN 868-5, ISO 11607-1, ISO 11140-1 ning Meditsiiniseadmete Direktiiviga 93/42/EEC Class 1

#### Kuidas kasutada Sterilisatsioonirulle?

- I. Vali välja instrumendid või vahendid, mida soovid steriliseerida.
- II. Mõõda vahendite pikkus ning vali sobiva laiusega sterilisatsioonirull.
- III. Lõika sobiva pikkusega osa rullist. Arvesta, et rahvusvahelised standardid soovitavad, et pakendi täidetud ei tohiks ületada 75% ja meditsiiniseadme kaugus ülemisest kinnitusest ei tohiks olla vähem kui 3cm. Üldiselt piisab 6-8cm vabast ruumist (pikkuses), et neid standardeid täita.

Tähelepanu!

Keevitusmasin (kinnitamiseks) peaks olema regulaarselt valideeritud, olemaks kindel, et valitud temperatuur vastab tegelikkusele. Rahvusvahelised standardid soovitavad keevitusaparaati ja selle sulgemisvõimet kontrollida kord

päevas enne masina kasutamist. Selleks on mugav kasutada nt Seal Checker™-it.

- IV. Sulge alumine ots temperatuuril (170-180°C, Tyvek'i puhul 120-125°C).
- V. Pane steriliseeritavad vahendid ja keemiline indikaator kotti.
- VI. Sulge koti ülemine osa.
- VII. Pane valmispakid korvi või vastavalt oma tööjuhenditele sterilisatsiooniks valmis.
- VIII. Steriliseeri kotid.
- IX. Sterilisaatorit tühjendades, kontrolli, et õige keemiline indikaator on muutnud värvi.
- X. Pakendid peaksid olema täiesti kuivad, vastasel juhul ei saa kindel olla steriilsuse säilimises.
- XI. Hoiusta steriliseeritud vahendid selleks ettenähtud kohas.

Tähelepanu! Kottidel peaks olema märgitud aegumiskuupäev, sterilisatsiooni kuupäev, autoklaavi ja tsükli number, et oleks vajadusel lihtsam tuvastada, millisest korrast antud pakk pärit on. Seda saab teha keevitusaparaatidega (kui võimalik), kasutades spetsiaalseid pakside etikette või kirjutades need andmed spetsiaalse markeriga pakile.

#### Ettevaatusabinõud

Rahvusvahelised standardid soovitavad kasutada ainult roteeruvaid kuumkeevituse aparate meditsiiniseadmete sulgemiseks. Kuid kui ainult impulss/kangiga sulgejat (bar sealer) on võimalik kasutada, peaks pöörama erilist tähelepanu lõõtsaga sterilisatsiooni kottide sulgemisel.

#### Säilitamise tingimused

Hoida tooteid kuivas, vedelike eest kaitstuna. Kaitsta otsese päikesevalguse ja UV kiirguse eest. Säilitada 10-40° juures, ruumis, mille suhteline õhuniiskus on 20-80%. Kui toodete säilitamiseks vajalikud tingimused on täidetud, garanteerib SP Medikal toodete vastavuse standarditele säilivusaja piires.