

SUCTION[®]1

HAPPELINE IMURSÜSTEEMIDE PUHASTUSVAHEND

konsentraat

SUCTION[®] 1 on väga hea puhastusvõimega hambaravi imursüsteemide pesemis- ja hooldusvahend. Soovitatakse kasutada toodet 1-2 korda nädalas jääkainetest ja mittelahustuvatest sooladest tingitud problemaatiliste ummistusohlike piirkondade hooldamiseks. Regulaarne kasutamine aitab ära hoida ummistuste teket ning lahustab jääkainete kogumikke.

TOOTE OMADUSED

- hooldab torusüsteeme
- ei vahuta

KASUTAMINE

Kinniste süsteemide happeline läbipesu teha 1-2 korda nädalas 2% konsentraadist ja veest valmistatud töölahusega (lisada 980ml veele 20ml Suction[®] 1 konsentraati), seejärel valada veel 1 liiter töölahust (või osa algsest lahusest) ka süljekaussi. Pärast toimeaja möödumist loputada süsteem jaheda veega (vähemalt joogivee kvaliteediga).

NB! Ei ole soovitatav hoida lahust süsteemis üle ettenähtud toimeaja.

Soovitatakse on kord aastas läbi viia aspiratsiooni- ja separatsioonisüsteemide intensiivpesu. Valmistada 2 x 5L töölahus (lisada 4900ml veele 100ml konsentraati) ja lasta 5L töölahust aspireerida imursüsteemi ning teine 5L valada valamusse, et puhastada separatsioonisüsteem. Enne tööle asumist loputada süsteem jaheda veega (vähemalt joogivee kvaliteediga).

TÖÖLAHUSE KONSENTRATSIOON JA TOIMEAEG

2%	20ml/l	10min
----	--------	-------

SÄILITAMINE

Vt pakendil olevat kõlblik kuni kuupäeva. Et tagada toote kvaliteeti, säilitada temperatuuril 5-25°C, mitte hoida otse päikese kiirguse käes ja vältida külmumist.

UTILISEERIMINE

Töölahus on ökoloogiliselt ohutu, kõik aktiivsed toimeained on äravoolus biolagunevad. Plastpakendi materjalid on taaskasutatavad. Kogumiseks tuleks plastpakend veega loputada ning pudel ja kork eraldada. Toodete transportkast kogutakse vanapaberi konteinerisse. Tagatud on pakendi ja toote kokkusobivus.

OHUTUSALANE TEAVE

Täiendava ohutusteabe leiate toote ohutuskaardilt.

KOOSTIS

sidrunhape, dimetüüldioktüülammooniumkloriid, apelsiniõli (magus)

pH ≤1

Toode omab CE-märgistust vastavalt Meditsiiniseadmete Direktiivile 93/42/EEC



PAKENDID



1L doseerimispuudel



Goodpoint Chemicals OÜ
Urda tee 2/1, Jälgimäe 76404,
Saku vald, Harjumaa, Estonia
www.goodpointchemicals.com
info@goodpointchemicals.com

