

GLOBAZYME® BLOOD REMOVER

ENSÜÜMIDEL PÕHINEV TÕHUS VEREPLEKIEEMALDAJA

GLOBAZYME® BLOOD REMOVER on ensüümidel ja pindaktiivsetel ainetel põhinev puhastusvahend, mis eemaldab kiiresti ja tõhusalt nii värsked kui ka kuivanud vereplekid ning bioloogilised jäägid. Toode on spetsiaalselt välja töötatud meditsiiniseadmete (sh ortopeediliste madratsite, lamatiste ennetamiseks mõeldud voodikate ja ratastoolipatjade) pindade puhastamiseks, et tagada seadmete hügieeniline seisukord ning sobivus kasutamiseks patsientidel. Lisaks sobib GLOBAZYME® BLOOD REMOVER ka üldiseks kasutamiseks, eemaldades tõhusalt vereplekid erinevatelt tekstiilidelt (sh heledad ja värvilised kangad) kodus majapidamises, pesumajades, hotellides, haiglates ja hooldekodudes.

TOOTE OMADUSED

- **Kiire ja tõhus toime** – eemaldab nii värsked kui ka kuivanud vereplekid.
- **Universaalne kasutus** – sobib nii ortopeediliste madratsite, voodikatete ja ratastoolipatjade jaoks kui ka kodumajapidamistes, pesumajades, hotellides, haiglates ja hooldekodudes.
- **Biolagunev koostis** – keskkonnasõbralik, ei jäta pindadele jääke.
- **Säilitab kangaste omadused** – ei kahjusta värve ega tekstuuri.
- **Sisaldab ensüüme** – lagundab tõhusalt vere ja muud bioloogilised jäägid.

KASUTAMINE

Eemaldada lahtine mustus puhastatavalt pinnalt. Pihustada toodet umbes 20 cm kauguselt vereplekile, kuni plekk on ühtlaselt niisutatud. Vältida pinna hõõrumist või harjamist. Jätta vahend toimima 15–20 minutiks.

Seejärel pesta kangas tavapärase pesuprogrammiga temperatuuril alla 60 °C, et vältida valgupleki kinnistumist ja säilitada ensüümide toime. Vajadusel korrata protseduuri raskemate plekkide korral.

SÄILITAMINE

Vt pakendil olevat kõlblik kuni kuupäeva. Säilitada temperatuuril 5-25°C, mitte hoida otsese päikesekiirguse käes.

UTILISEERIMINE

Toode on ökoloogiliselt ohutu, kõik aktiivsed toimeained on äravoolus biolagunevad. Plastpakendi materjalid on taaskasutatavad. Kogumiseks tuleks plastpakend veega loputada ning pudel ja kork eraldada. Spray oma metallosadega sobib pakendijäätmetega kokku kogumiseks. Toodete transportkast kogutakse vanapaberi konteinerisse. Tagatud on pakendi ja toote kokkusobivus.

KOOLITUS JA NÕUANDED

Lugeda hoolikalt läbi kasutusjuhend ja ohutuskaart enne toote kasutamist. Toodet on ohutu ja lihtne kasutada ilma erialase väljaõppeta.

KOOSTIS

Puhastatud vesi, pindaktiivseteainete kompleks, proteaas, lipaas.

Toode omab CE-märgistust vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EL) 2017/745.



PAKENDID:1L spray



Goodpoint Chemicals OÜ
Urda tee 2/1, Jälgimäe 76404,
Saku vald, Harjumaa, Estonia
www.goodpointchemicals.com
info@goodpointchemicals.com



Kasutage desinfitseerimisvahendeid ohutult. Enne kasutamist lugege kindlasti läbi etikett ja tooteteave.

02/2026